

CARUMED

Because we care!

Digital Febertermometer SC 44 Flex



SC 44 Flex är en så kallad maximumtermometer, vilket innebär att den högsta uppmätta temperatur visas efter 30 sekunders mättid. Slutet på mättiden markeras med en signalton.

Det senaste mätvärdet sparas. För att se senaste värde hålls på-knappen intryckt i tre sekunder. När knappen släpps är termometern redo för ny mätning. Termometern levereras i en transparent hårdplastask för förvaring.

Termometern finns tillgänglig i tre varianter: anka, groda och pingvin.

- Flexibel spets
- 30 sek mättid
- Feberlarm
- Sparar senaste mätvärdet
- Signalton
- Vattentät

För en precis och säker mätning rekommenderas rektal mätning (i anus). Denna metod är särskilt rekommenderad för bebisar och barn. För in termometern upp till 2 cm i anus. När termometern piper är mätningen klar.

Alternativ mätmetod är i munhålan (under tungan). Se till att munnen är stängd under mätningen, och att toppen på termometern hela tiden är i kontakt med vävnaden i munnen, i annat fall blir inte mätvärdet korrekt.

Att mäta axillärt (i armhålan) är inte att rekommendera då det är mycket stor risk att mätvärden blir fel.

Mätområde	32,0°C - 43,9°C
Utlösningsträns	0,1°C
Precision	±0,2°C < 35,5°C ±0,1°C vid 35,5°C-42°C ±0,2°C > 42°C
Display	Tresiffrig LCD
Förvaringsförhållanden	0-50°C, rel. luftfuktighet 15-95%
Batteri	1 * LR41 (1,5V)
Batteriindikator	Byt batteri när symbolen "tomt batteri" visas
Avstänging	Automatisk efter 3 min
Dimensioner	154*21*12mm
Vikt	18g med batteri

Artikelnummer

240310	Osorterade varianter
240311	Anka
240312	Groda
240313	Pingvin

CARUMED

Företagshusvägen 5, 244 93 Kävlinge, Sweden

Tel: +46 (0) 46 - 73 41 00

info@carumed.se, www.carumed.se